

## Sitt-, köks-/coxitdyna lätt & standard

---

Tag bort plastpåsen och iaktta hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Köksdynan har ingen BAK-etikett då dynans form visar hur den ska placeras. Handtaget på dynan placeras åt höger och neråt, den svarta etiketten med gul text (BAK), visar vad som är bak på dynan. Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den. Köksdynan har inget bärhandtag.

Notera den vita etiketten på sidan där rättvänd/ läsbar text visar vad som är sittyta/ uppåt.

Coxit modell med  $\frac{1}{2}$  eller  $\frac{1}{4}$  urtag, är dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller båda låren lutande framåt. Används efter en höftledsoperation, för att höftledsvinkeln ska bli ca 70 grader. *Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras framåt.* Notera speciellt placeringen av dynan om det har ett  $\frac{1}{4}$  urtag. Mjuka delen ska vara framåt och på samma sida som den opererade höftleden.

För att minska risk för framåtgång är överdraget monterat med motsatt fiberriktning. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Vid inkontinens kan med fördel en skyddshätta användas som finns som tillbehör.

Även inkontinensskyddade förhöjningsdynor som är lätta att rengöra finns i vårt sortiment.

### Art.nr, storlek, brukarvikt och ISO-kod

Artikelnummer, storlek och brukarvikter finns på baksidan.

Dynans vikt: Sittdyna lätt hel 40x40x7,5cm 0,70kg

Sittdyna standard hel 40x40x7,5cm 1,10kg

ISO-kod: 180942 AH Förhöjande dynor

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

### Rengöring och skötsel

Löst överdrag tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas. Dyna med överdrag kan tvättas med skontvätt 40 grader, utan centrifugering. Torkas på galler med varmluft. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

### Målgrupp

Förhöjningsdynor tillverkas i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande.

Coxit, är dynor med mjukare del i dynan som positionerar ena eller båda låren lutande framåt.

Används efter en höftledsoperation, för att höftledsvinkeln ska bli cirka 70 grader.

Dynornas stomme tillverkas i två olika utföranden:

Lätt – som lämpar sig bl.a. för reumatiker, då den väger lite och är lätt att bära med sig.

Standard – som är fastare och stadigare men också lite tyngre, klarar högre brukarvikt.

### Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".

Art.nr, storlek, brukarvikt

Sittdyna lätt hel			Sittdyna lätt 1/2 urtag			Sittdyna lätt1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B130	40x40x5	90	B1352	40x40x5	90	B1354	40x40x5	90
B131	40x40x7,5	100	B1362	40x40x7,5	100	B1364	40x40x7,5	100
B132	40x40x10	100	B1372	40x40x10	100	B1374	40x40x10	100
B133	40x40x12,5	100	B1382	40x40x12,5	100	B1384	40x40x12,5	100
B134	40x40x15	100	B1392	40x40x15	100	B1394	40x40x15	100
B13045	45x40x5	90	B136245	45x45x7,5	125			
B13145	45x45x7,5	125	B137245	45x45x10	125			
B13245	45x45x10	125	B136250	50x50x7,5	140			
B13150	50x50x7,5	140	B137250	50x50x10	140			
B13250	50x50x10	140						
Sittdyna standard hel			Sittdyna standard 1/2 urtag			Sittdyna standard 1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B100	40x40x5	100	B1152	40x40x5	100	B1184	40x40x7,5	110
B103	40x40x7,5	110	B1182	40x40x7,5	110	B1214	40x40x10	110
B106	40x40x10	110	B1212	40x40x10	110			
B109	40x40x12,5	110	B1242	40x40x12,5	110			
B112	40x40x15	110	B118245	45x45x7,5	125			
B10345	45x45x7,5	125	B121245	45x45x10	125			
B10645	45x45x10	125	B118250	50x50x7,5	150			
B10350	50x50x7,5	150	B121250	50x50x10	150			
B10650	50x50x10	150						
Köksdyna lätt hel			Köksdyna lätt 1/2 urtag			Köksdyna lätt1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B230	39x36x5	90	B2352	39x36x5	90	B2354	39x36x5	90
B231	39x36x7,5	100	B2362	39x36x7,5	100	B2364	39x36x7,5	100
B232	39x36x10	100	B2372	39x36x10	100	B2374	39x36x10	100
B233	39x36x12,5	100	B2382	39x36x12,5	100	B2384	39x36x12,5	100
B234	39x36x15	100	B2392	39x36x15	100	B2394	39x36x15	100
Köksdyna standard hel			Köksdyna standard 1/2 urtag			Köksdyna standard 1/4 urtag		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B200	39x36x5	100	B2152	39x36x5	100	B2184	39x36x7,5	110
B203	39x36x7,5	110	B2182	39x36x7,5	110	B2214	39x36x10	110
B206	39x36x10	110	B2212	39x36x10	110			
B209	39x36x12,5	110	B2242	39x36x12,5	110			