



## Bruksanvisning

Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Köksdynan har ingen BAK-etikett då dynans form visar hur den ska placeras.

Handtaget på dynan (gäller ej köksdynan) placeras åt höger och neråt.  
Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den.  
Notera den vita etiketten på sidan där rättvänd/ läsbar text visar vad som är sittyta/ uppåt.

För att minska risk för framåtgång är överdraget monterat med motsatt fiberriktning. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget.

Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Vid inkontinens kan med fördel en skyddshätta användas som finns som tillbehör.

## Art.nr, mått, brukarvikt och ISO-kod

Art.nr	Mått	Brukarvikt (max)	Art.nr	Mått	Brukarvikt (max)
B150	40x40x7,5cm	100kg	B250	Köks 39x36x7,5cm	100kg
B151	40x40x10cm	100kg	B251	Köks 39x36x10cm	100kg
B309	40x40x6/2cm	90kg	B310	Köks 39x36x6/2cm	90kg
B3098	40x40x8/2cm	100kg	B3108	Köks 39x36x8/2cm	100kg

ISO-kod: 180942. Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

## Rengöring och skötsel

Löst överdrag tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas. Dyna med överdrag kan tvättas med skontvätt 40 grader, utan torktumling. Torkas på galler med varmluft. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

## Målgrupp

Dynan finns i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande samtidigt som de avlastar svanskotan.

Kildyna används för att få ett något framåttippat bäcken vilket medför ergonomisk riktig sittställning

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se).

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läkemiddelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".