



Bruksanvisning

Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras.

Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan.

Rullstolsdyna kupad används till rullstolar med hängmattesits för att fylla ut fördjupningen.

Dynans kupning ska placeras ner (ej sittyta). Läsbar text på den vita etiketten visar vad som är sittyta/uppåt. Dragkedjan ska vara ner/ under dynan.

För att minska risk för framåtgång är överdraget monterat med motsatt fiberriktning.

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget.

Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Vid inkontinens kan med fördel en skyddshätta användas som finns som tillbehör.

Art.nr, storlek, brukarvikt och ISO-kod

Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B400	28x27x5	30	B405	36x40x5	70	B415	45x45x6,5	125
B401	32x27x5	30	B408	40x36x5	90	B417	50x40x6,5	130
B402	32x30x5	40	B409	40x40x6,5	100	B418	50x43x6,5	130
B403	32x33x5	40	B410	40x43x6,5	100	B41845	50x45x6,5	130
B404	35x36x5	50	B411	40x45x6,5	100	B41850	50x50x6,5	140
B406	36x30x5	70	B413	45x40x6,5	110	B41943	55x43x6,5	150
B407	36x33x5	70	B414	45x43x6,5	125	B419	55x48x6,5	150

ISO-kod: 180942 AA Dynor för korttidssittande

Vikt 45x43x6,5cm 0,9 kg. Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendragen dragkedja. Kan centrifugeras och torktumlas. På vår hemsida (ladda hem dokument) finns en beskrivning om hur man enklast klär en kupad rullstolsdyna efter tvätt. Överdraget krymper inte och med denna teknik är det lätt att trä på. Vid inkontinens används skyddshättan (tillbehör) som gör det enkelt och smidigt vid tvätt. Dessutom "sätter sig" inte urindoft i dynan.

Dyna med överdrag tvättas i skontvätt 40 grader, utan centrifugering. Torkas på galler med varmluft. Var noga med att dynan är helt torr innan den används igen.

Målgrupp

Rullstolsdyna kupad tillhör ISO-kod 180942 AA. Dynor för korttidssittande.

Stabil, komfortabel rullstolsdyna, avsedd för personer som sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läkemedelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".