


Bruksanvisning

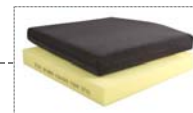

Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras.
Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan.
Dynans svängda bakkant är formad för passa i utrymmet mellan rullstolens ryggrör.

Rullstolsdyna spinner, är vändbar och används till rullstolar med en plan sits.
Dynans sitsdjup mäts från framkant till ryggrören. Dynans storlek ska passa rullstolens sits, annars finns risk för skjuvning.
Om dynan placeras i rullstol med hängmattesits bör den kombineras med en utjämningsplatta eller en komfortkil.

För att minska risk för framåtgång är överdraget monterat med motlugg. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Art.nr, storlek och brukarvikt

B50530	30x30x3cm	brukarvikt	15 – 30kg
B50535	30x35x3cm	"	"
B50635	32x35x3cm	"	"
B5072540	36x40x3cm	"	40 – 90kg
B507540	36x40x5cm	"	50 – 100kg
B5092540	40x40x3cm	"	40 – 90kg
B509540	40x40x5cm	"	50 - 100kg
B5102540	43x40x3cm	"	"
B510540	43x40x5cm	"	"
B510543	43x43x5cm	"	"
B5112540	45x40x3cm	"	"
B511540	45x40x5cm	"	50 – 110kg
B511543	45x43x5cm	"	"
B512543	50x43x5cm	"	60 – 120kg

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blyxtlås. Kan centrifugeras och torktumlas.

Dyna med överdrag tvättas i skontvätt 40 grader, utan centrifugering. Torkas på galler med varmluft.
Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Målgrupp

Rullstolsdyna spinner tillhör ISO-kod 180942 AA, Dynor för korttidssittande.

Komforthöjande rullstolsdyna, avsedd för personer som sitter kortare stunder i rullstol t.ex. vid transporter.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Rullstolsdyna spinner tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.
Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se

Överdraget tillverkas av Trevira CS textil med laminerad undersida som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.
Företaget är anslutet till REPA-registret.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan är brandsäker hela livslängden även efter tvätt.
CE-märkning enligt Läke medelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran om överensstämmelse finns för den registrerade produkten. Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".