

Bruksanvisning



Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras.
Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan.



Dynans sitsdjup är 55cm och kan varieras genom att skära av dynan till önskat djup. Överdraget har en fastsättning med kardborreband och passar till sitsdjup 35 – 55cm. I framkant under överdraget finns en ficka för komfort-/ positioneringskil.

Om dynan placeras i rullstol med hängmattesits bör den kombineras med en utjämningsplatta eller en komfortkil.

Dynans storlek ska passa rullstolens sits, annars finns risk för skjuvning.

För att minska risk för framåtgång är överdraget monterat med motlugg. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Art.nr, storlek och brukarvikt

B95235	35 x 50 x 5cm	brukarvikt 50 – 90kg	B9532733	27x33x3cm	brukarvikt 15 – 30kg
B95237	37,5 x 50 x 5cm	" "	B95328	28x40x3cm	" 20 – 40kg
B95240	40 x 50 x 5cm	" 50 – 100kg	B95332	32x40x3cm	" 20 – 50kg
B95242	42,5 x 50 x 5cm	" 50 – 110kg	B95334	34x40x3cm	" "
B95245	45 x 50 x 5cm	" 50 – 125kg			
B95247	47,5 x 50 x 5cm	" "			
B95250	50 x 50 x 5cm	" 50 – 130kg			
B95252	52,5 x 50 x 5cm	" 70 – 150kg			
B95255	55 x 50 x 5cm	" "			
B95257	57,5 x 50 x 5cm	" "			

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas. Ficka för kil tvättas i 60 grader, centrifugeras och lufttorkas.

Dyna med överdrag tvättas i skontvätt 40 grader, utan centrifugering. Torkas på galler med varmluft. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Målgrupp

Bima varierbar tillhör ISO-kod 180942 AA dynor för korttidssittande.

Stabil, komfortabel sitt-/rullstolsdyna. Avsedd för personer som sitter kortare stunder i rullstol utan risk för trycksår.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se

Överdraget tillverkas av Trevira CS textil som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. Företaget är anslutet till REPA-registret.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan är brandsäker hela livslängden även efter tvätt. CE-märkning enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran om överensstämmelse finns för den registrerade produkten. Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".