

Bruksanvisning



Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras.
Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan.

Vid kall omgivningstemperatur (mindre än 12°C) ändrar alla T-foam material sin följsamhet och blir hårt och sprött. Därför är det viktigt att dynan förvaras i rumstemperatur eller uppnår *rumstemperatur innan den används*. Används dynan utomhus när det är kallt, bibehåller dynan sin följsamhet genom att kroppsvärme tillförs.

Art.nr B11250 – B11268 Svängd bakkant med plan botten, vändbar och passar till rullstolar med en plan sits.
" B11214 – B11220 Rak bakkant med plan botten, vändbar och passar till rullstolar med en plan sits.
Om dynan placeras i rullstol med hängmattesits bör den kombineras med en utjämningsplatta eller en komfortkil.

Art.nr B11230 – B11234 Rak bakkant med kupad botten, passar rullstolar med hängmattesits.

Dynans sitsdjup mäts från framkant till ryggrören. Dynans storlek ska passa rullstolens sits, annars finns risk för skjuvning.

För att minska risk för framåtgång är överdraget monterat med motlugg. Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Art.nr, storlek och brukarvikt

B11250	37,5 x 40 x 6cm	brukarvikt 40 – 90kg	B11214	40 x 40 x 5cm	brukarvikt 50 – 80kg
B11252	37,5 x 43 x 6cm	" "	B11218	40 x 40 x 7,5cm	" 50 – 100kg
B11254	40 x 40 x 6cm	" 50 – 90kg	B11216	45 x 40 x 5cm	" 40 – 80kg
B11256	40 x 43 x 6cm	" "	B11220	45 x 40 x 7,5cm	" 50 – 100kg
B11258	42,5 x 40 x 6cm	" "	B11215	45 x 45 x 5cm	" 40 – 80kg
B11260	42,5 x 43 x 6cm	" "			
B11262	45 x 40 x 6cm	" "	B11230	40 x 40 x 5(7,5)	" 40 – 90kg
B11264	45 x 43 x 6cm	" "	B11232	45 x 40 x 5(7,5)	" 50 – 90kg
B11274	47,5 x 40 x 6cm	" 50 – 100kg	B11234	45 x 45 x 5(7,5)	" 50 – 95kg
B11276	47,5 x 43 x 6cm	" "			
B11266	50 x 45 x 6cm	" "			
B11268	50 x 50 x 6cm	" "			

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas.

Dyna med överdrag tvättas i skontvätt 40 grader, utan centrifugering. OBS! får inte centrifugeras eller torktumlas, dynan kan då gå sönder. Torkas på galler med varmluft. Var noga med att dynan är helt torr innan den används.

Målgrupp

Bima T-foam CF42 tillhör ISO-kod 180942 AB Tryckfördelande dynor.

Stabil, komfortabel och tryckfördelande sitt-/rullstolsdyna. Avsedd för personer som är känsliga för tryck och smärta

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Dynan uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Bima T-foam CF42 tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.
Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se

Överdraget tillverkas av Trevira CS textil som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.
Företaget är anslutet till REPA-registret.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan är brandsäker hela livslängden även efter tvätt.
CE-märkning enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran om överensstämmelse finns för den registrerade produkten. Dynan uppfyller Hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation och är med i förteckningen över "Bra hjälpmedel".