


## Bruksanvisning

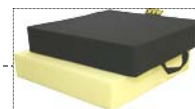

Tag bort plastpåsen och iakttag hur dynan ska placeras. Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan. Handtaget på dynan placeras åt höger och neråt. Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den.

Notera den vita etiketten på sidan där rättvänd/ läsbar text visar vad som är sittyta/ uppåt.

Efter tvätt är det mycket viktigt att montera överdraget rätt. Kontrollera att märkningen på stommen överensstämmer med märkningen på överdraget. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

## Egenskaper

Sittdyna inko (inkontinensskyddad) – textilyta med undersida av polyuretan. Ytan är lätt att torka av och hålla ren. Textilytan är mer luftig, men behöver torktid då den rengörs.

Sittdyna rekond (rekonditionerbar) – polyuretanyta som är spritbar, klarar att torkas av med de flesta alkoholbaserade desinfektionsmedel. Torkar omedelbart. Lämpar sig i miljöer där det finns flera användare och ställs höga krav på rekonditionering.

Dynornas stomme tillverkas i två olika utföranden:

1. Lätt - som lämpar sig bl.a. för reumatiker, då den väger lite och är lätt att bära med sig.
2. Standard – som är fastare och stadigare men också lite tyngre, klarar högre brukarvikt.

## Art.nr, storlek och brukarvikt

-I = Inkontinensskyddad      -R = Rekonditionerbar

### *Lätt stomme*

B130 -I/ -R	40x40x5cm	brukarvikt	50 – 90kg
B131 -I/ -R	40x40x7,5cm	"	50 – 100kg
B132 -I/ -R	40x40x10cm	"	"
B133 -I/ -R	40x40x12,5cm	"	"
B134 -I/ -R	40x40x15cm	"	"
B13045 -I/ -R	45x40x5cm	"	50 – 90kg
B13145 -I/ -R	45x45x7,5cm	"	70 – 125kg
B13245 -I/ -R	45x45x10cm	"	"
B13150 -I/ -R	50x50x7,5cm	"	70 – 140kg
B13250 -I/ -R	50x50x10cm	"	"

### *Standard stomme*

B100 -I/ -R	40x40x5cm	brukarvikt	50 – 100kg
B103 -I/ -R	40x40x7,5cm	"	50 – 110kg
B106 -I/ -R	40x40x10cm	"	"
B109 -I/ -R	40x40x12,5cm	"	"
B112 -I/ -R	40x40x15cm	"	"
B10345 -I/ -R	45x45x7,5cm	"	50 – 135kg
B10645 -I/ -R	45x45x10cm	"	"
B10350 -I/ -R	50x50x7,5cm	"	80 – 150kg
B10550 -I/ -R	50x50x10cm	"	"

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

## Rengöring och skötsel

Löst överdrag tvättas i 60 grader med igendraget blixtlås. Kan centrifugeras och torktumlas.

Dyna med överdrag rengörs för hand med ytdesinfektion t.ex. Virkon. Vanligt förekommande desinfektionsmedel som innehåller isopropyl alkohol kan med fördel användas. Ytorna torkas försiktigt med fuktad torkduk och får sedan lufttorka.

## Målgrupp

Tillhör ISO-kod 180942 AG Förhöjande dynor

Dynorna finns i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande. Lämpar sig i offentliga miljöer där det ställs höga krav på rekonditionering.

## Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Dynorna uppfyller brandnorm ISO7176-16.

Tillverkas i Sverige av BIMA Plastteknik AB, Trålvägen 5, 432 74 Träslövsläge.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)

Överdraget tillverkas av Dartex som är brandsäker utan att vara allergiframkallande och miljöbelastande.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad enligt ISO9001 samt miljöcertifierad enligt ISO14001.

Efter förbrukning lämnas dynan till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning. Företaget är anslutet till REPA-registret

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. CE-märkning enligt Läkemiddelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 samt att teknisk dokumentation och en försäkran om överensstämmelse finns för den registrerade produkten.